

使い勝手を追求、さまざまな診療スタイルにフィットする

システムキャビネット Varie(ヴァリエ)誕生!

基本タイプにオプションを加えることで、より機能的な診療空間に。
豊富なバリエーションから医院のスペースやインテリアにマッチした
キャビネットをお選びいただけます。



Varie

カラーバリエーション



オプションバリエーション



LED照明



混合水栓



PCラック




紫外線消毒ボックス




紙コップホルダー



モービルキャビネット

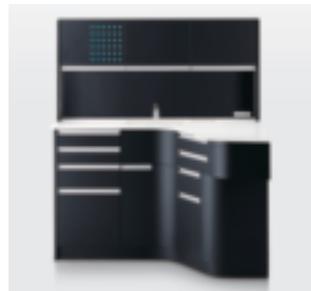

基本タイプ
+ 紫外線消毒

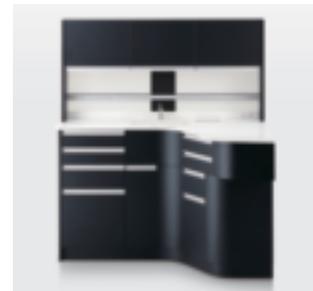

基本タイプ
+ 小物トレー
+ アクリルパネル
+ アルミレール



基本タイプ
+ 紫外線消毒
+ 小物トレー
+ アクリルパネル
+ アルミレール
+ PCラック



基本タイプ
+ 紫外線消毒
+ 小物トレー
+ アクリルパネル
+ アルミレール
+ PCラック
+ LEDライト




システムティックな機材の収納と配置

作業サークル

歯科診療室で行う作業を5つにわけてその流れを表したものが、作業サークルです。1人の患者さんを診療する度に、このサークルが繰り返されることになります。作業を能率よく進め診療効率を高めるためには、この作業の流れをスムーズにすることです。歯科診療キャビネット『ヴァリエ』は、診療室での作業内容とそのための人の動きを分析して、人間工学の立場から最も合理的で使いやすい形を追求した総合的キャビネットです。

作業エリア

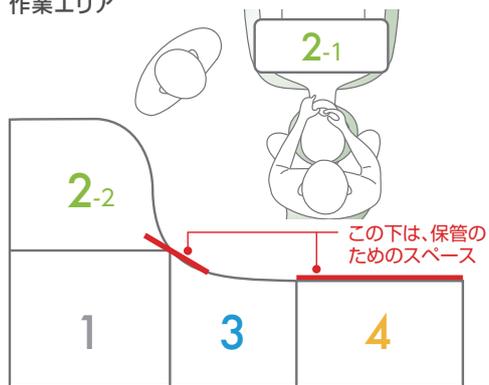

- 1 診療と診療の間の準備エリア
- 2-1 診療中補助作業のためのエリア
- 2-2 診療中に必要な器材をおいたり取り上げたりするエリア
- 3 手洗い・器具の清掃・洗浄のためのエリア
- 4 消毒・殺菌・滅菌のためのエリア




1 手洗い・器具の準備

術者が、直接右手で取り上げて使う器材は、チェアのトレーの上に準備します。アシスタントが手渡す器材や練和作業などに使用する器材は、キャビネットの補助作業のためのエリアに配置します。




2 診査・診断・治療

診査を行う時はアシスタント作業エリアに、検査結果入力用PC等を設置し、記録作業をアシスタントが行います。アシスタントが練和作業を行う時は、キャビネット方向に体を回転させるだけで行うことができます。

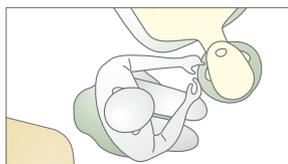

1. 患者さんの口腔内の作業

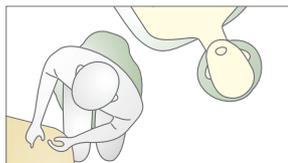

2. 患者さんの口腔周辺作業

3 手洗い・器具の清掃・洗浄


自動水栓から水がでるので、タッチレスで衛生的です。手洗い後、シンクの上にセットされているペーパータオルで拭いて、ダストシュートに捨てるので動作に無駄がありません。



4 消毒・殺菌・滅菌

薬液消毒等を行う場合は、ステリソーカーなどの薬液槽をシンク左側の天板上のエリアに設置します。洗浄後、器具・器材をすぐに投入できるので衛生的で効率的です。



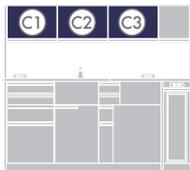

①-1 上棚(左側)

- ・マスク
(Dr用・アシスタント用)
- ・グローブ
(Dr用・アシスタント用)



①-2 上棚(左側)

- ・カップ収納
- ・器材保管スペース
(紫外線消毒オプション)



② 上棚(中央)

- ・注射針
- ・ペーパータオル
- ・廃棄注射針ケース
- ・在庫



③ 上棚(右側)

- ・基本セット
- ・スクレーラー
- ・ティッシュペーパー



① 左引出(1段目)

- ・外科セット
(インストゥルメント)



② 左引出(2段目)

- ・外科セット(針・糸・メス等)



③ 左引出(3段目)

- ・リベース
- ・レジン等



④ 左引出(4段目)

- ・エプロン
- ・消毒用エタノール等



① 右引出(1段目)

- ・各種バー
- ・形成セット




② 右引出(2段目)

- ・開口器
- ・光重合セット等





③ 右引出(3段目)

- ・根管治療用セット

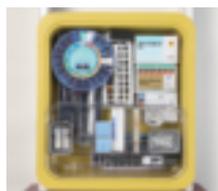

④ 右引出(4段目)

- ・ラバーダム
- ・在庫

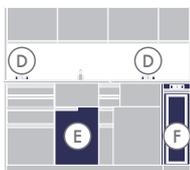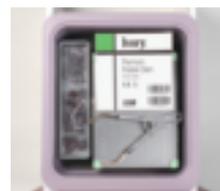

① 上部コンセント



**② ダストボックス
収納スペース**



**③ コンピュータ
収納スペース(オプション)**

