

フロー・サイナスケア® ラインアップ

販売名: フロー・サイナスケア®

名称等: 鼻用洗浄器 一般医療機器 器55 (JMDNコード41599000)

使用目的: 鼻腔内の洗浄

届出番号: 27B1X00118000014

ent
TECHNOLOGIES



フロー・サイナスケア® スターターキット

内容物: 洗浄用ボトル + 洗浄剤(粉)12包




フロー・サイナスケア® 洗浄剤(粉)リフィル50包

内容物: 洗浄剤(粉)50包



フロー・サイナスケア® 洗浄剤(粉)リフィル100包

内容物: 洗浄剤(粉)100包

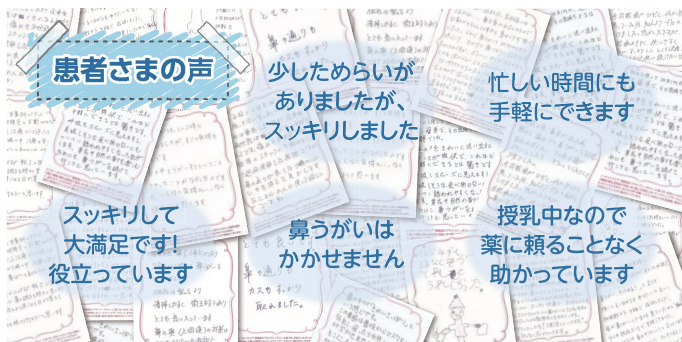

患者さまの声

少しためらいが
ありましたが、
スッキリしました

忙しい時間にも
手軽にできます

スッキリして
大満足です!
役立っています

鼻うがい
はかせません

授乳中なので
薬に頼ることなく
助かっています

製品のお問合せ先 (フロー・サイナスケア® お客さま相談室)
TEL.06-6948-5665 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)
Email:info@flo-ent.jp <https://www.flo-ent.jp/dental>



【販売者】株式会社 モリタ 564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号
【製造販売業者】有限会社 ウィルデント 530-0047 大阪市北区西天満3丁目7-22

flo™

フロー・サイナスケア®



フロー・サイナスケア®は
毎日を清々しく過ごしたい方のために
開発された鼻腔・副鼻腔洗浄キットです。

お子さま®から大人まで
手軽にお使いいただけます。

※自分で鼻がかる4歳以上

フロー・サイナスケア®はご家庭で手軽に利用できる鼻腔・副鼻腔キットです。
防腐剤無添加、ひとの体液にとっても近い成分(等張電解質液)なので、
刺激は少なく、鼻腔内がすっきりします。

製品の特長

Point1 気持ちいい




洗浄液は鼻腔洗浄を目的として開発され、ひとの体にとっても近い成分(等張電解質液)なので、刺激は少なく、鼻腔内がすっきりします。

※防腐剤・香料は入っていません。



Point2 鼻の奥まで洗浄液が届く

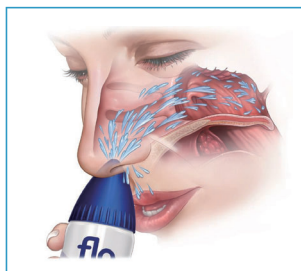

鼻の奥は、外部から侵入する異物に接しやすい部位なので、いつも清潔にしておくことが重要です。温かな洗浄液が鼻腔内を優しく洗浄します。

Point3 衛生的で使いやすい洗浄用ボトル

衛生管理が
しやすい広い開口部



ボトルを軽く押すだけで洗浄液が鼻腔内を優しくしっかり流れます。洗浄液を鼻で吸う必要はありません。広い開口部は、使用後のボトル洗浄がやすく、乾燥が早い構造です。

使用方法

※ご利用時には商品に付属の【説明書】を良くお読みください。



洗浄剤(小袋)1包の粉と、ひと肌程度に温めたお水をボトルの線まで入れます。キャップをしっかりと締めて、洗浄剤が溶けるようボトルを振ります。



キャップ先端を一方の鼻の穴に軽く当て、口で息をしながら、そっとボトルを握ると温かい洗浄液が反対側の鼻や口から出てきます。残った洗浄液で反対側の鼻も同じ手順でおこないます。

よくある質問

Q. どういうタイミングで使えば良いですか？

A. 医師からの指示がない場合は、あなたの症状、生活シーンに合わせて1日1回～2回お使いください。

Q. しばらくして洗浄液が流れてきます

A. ひとにより程度の差はありますが、時間差で鼻腔内に残った少量の液が流れ出ることがあります。海やプールで遊んだ後と同じ現象で、心配はありません。

Q. 怖いのですが...

A. 鼻で水を吸う必要はありません。ボトルを軽く押すと自然に鼻の中を流れます。恐怖心の強い方は「ちょろちょろ」と少量からスタートすれば良いでしょう。

動画：鼻うがいの仕方編

QRコードを開けない方はURLからCheck!

<https://www.flo-ent.jp/movie/94372/>

私がお案内します!

