




UTML	Ultra Translucent Multi Layered
STML	Super Translucent Multi Layered
YML	Yttria Multi Layered
HTML PLUS	High Translucent Multi Layered PLUS

HT	High Translucent
LT	Low Translucent

▶ ジルコニアの最小の厚み


**UTML**    **STML**

※1 0.4mm以上はグレース、研磨で仕上げる場合の厚みです。陶材を築盛する場合は、0.8mm以上確保してください。

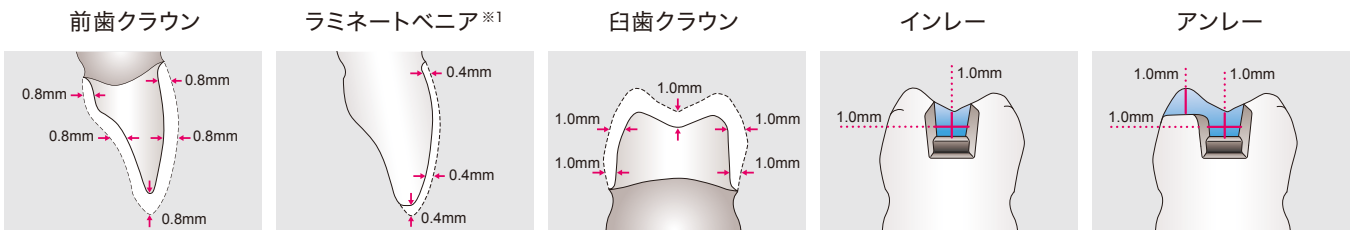


**YML**    ※2

※2 フルジルコニア修復物、陶材築盛用フレームとも、前歯部 0.4mm、白歯部 0.5mmの厚みは、ディスクの下半分に位置する場合の厚みです。  
※3 ラミネートベニアにおいて、陶材を築盛する場合には、ディスクの上半分に位置するフレームの厚みは0.8mm以上確保してください。

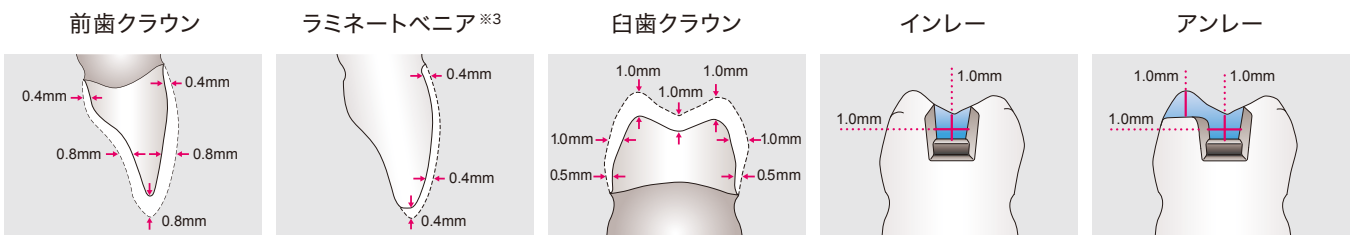

**HTML PLUS**    **HT**    **LT**

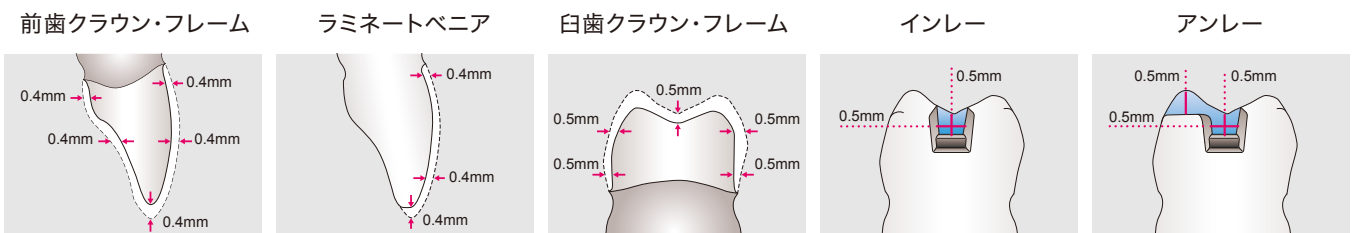

推奨形成例




※4 陶材築盛の場合 ※5 フルジルコニアクラウンの場合

ノリタケ カタナ® ジルコニア 特設サイト

製品のより詳しい情報や  
関連製品はこちらから




禁忌となる形態

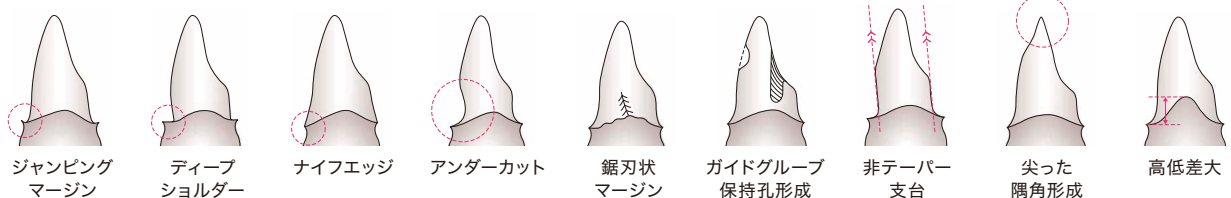


# シリーズ比較

## 推奨用途

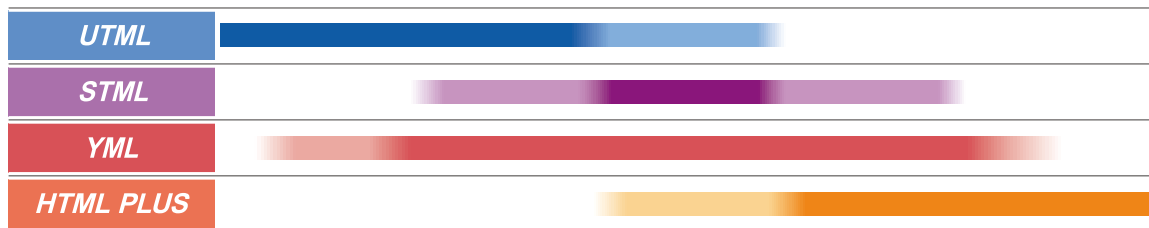


単色の **HT/LT** は、陶材を築盛するフレーム用途に適しています。

## 透光性

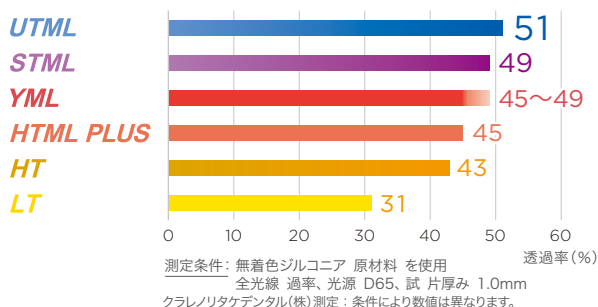

## 機械的特性 (曲げ強さ)

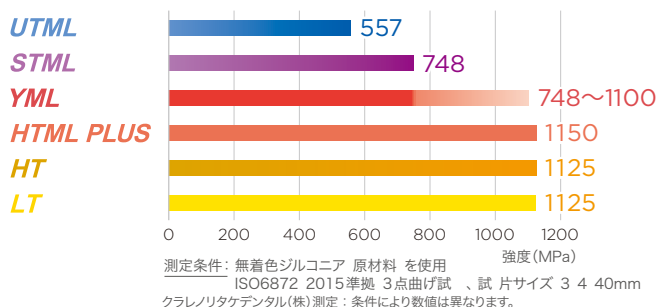

## カラーバリエーション

### マルチレイヤードシリーズ

	NW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	ENW	EA1	
UTML	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STML	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
YML	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HTML PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### 単色シリーズ


Series	HT10	HT12	HT13
LT	●	●	●
HT	●	●	●

色調	HT10 LT10	HT12 LT12	HT13 LT13
色調目安	EW0o	EWY	A2
「セラビアン®ZR」 使用の場合	EWo EW 全ての色調 (+SB)	NW0.5 A1 NP1.5 B1 B2	A3 NP2.5

※ SB…シェードベース

## サイズバリエーション

厚み	10 mm	14 mm	18 mm	22 mm	26 mm
UTML	●	●	●	●	●
STML	●	●	●	●	●
YML	●	●	●	●	●
HTML PLUS	●	●	●	●	●
HT	●	●	●	●	●
LT	●	●	●	●	●

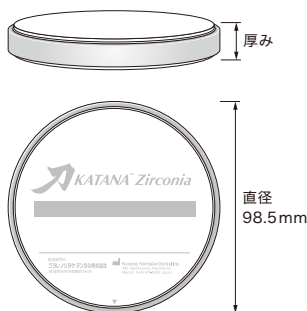

- ノリタケ カタナ® ジルコニア 管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号: 223AFBZX00185000
- セラビアン®ZR 管理医療機器 歯科用陶材 医療機器認証番号: 223AFBZX00161000
- 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

## クラレノリタケデンタル株式会社

お問い合わせ  
☎ 0120-330-922 平日 10:00~12:00 13:00~17:00  
〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー  
【製造販売元】クラレノリタケデンタル株式会社 〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28  
【販売元】株式会社モリタ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 お客様相談センター: 0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)

## クラレノリタケデンタル 公式アプリのダウンロード

推奨 OS バージョン iOS 11.0 以上 / Android 8.0 以上



## クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報  
配信中!